

Angelcare®

AC401

- | | |
|---|--|
| <i>Rechargeable Movement & Sound Monitor</i> P.2 | <i>Oppladbar babycall for bevegelse og lyd</i> P.44 |
| <i>Moniteur de mouvements et de son rechargeable</i> P.9 | <i>Uppladningsbart Ljud- och Rörelselarm</i> P.51 |
| <i>Monitor de Movimiento y Sonido Recargable</i> P.16 | <i>Opladelig bevægelse/lyd babyalarm</i> P.58 |
| <i>Wiederaufladbarer Geräusch- und Bewegungsmelder</i> P.23 | <i>Uudelleen ladattava liike- ja äänimonitori</i> P.65 |
| <i>Monitor de movimento e som recarregável</i> P.30 | <i>Monitor Ruchu i Dźwięku z akumulatorkiem</i> P.72 |
| <i>Oplaadbare Geluids- en Bewegingsmonitor</i> P.37 | <i>Légzésfigyelő és babaőrző monitor</i> P.79 |




SPIS TREŚCI

Elementy składowe monitora Angelcare® i dodatkowe funkcje.....	72
Obsługa monitora Angelcare®.....	73
Testowanie monitora Angelcare®.....	76
Ostrzeżenia.....	76
Zalecenia.....	76
Rozwiązywanie problemów.....	77
Gwarancja.....	78
Dystrybutorzy.....	87

ELEMENTY SKŁADOWE MONITORA ANGELCARE®



DODATKOWE FUNKCJE

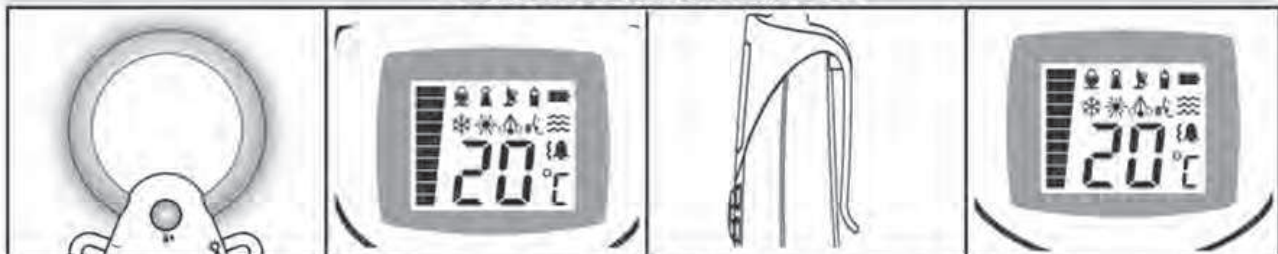

Praktyczna lampka nocna.


Możliwość aktywacji głosem lub ciągły odbiór dźwięku.

Wygodny zaczep do paska.

Temperatura w pokoju dziecięcym wyświetlana na odbiorniku.

ALARM I OSTRZEŻENIE

Monitor Angelcare® informuje o braku ruchu za pomocą sygnału dźwiękowego, optycznego i wibracji. Praktyczny przenośny odbiornik przez cały czas przekazuje informacje.

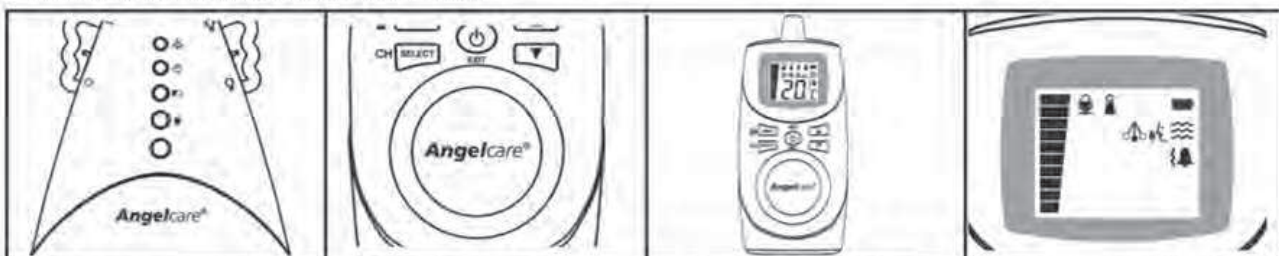

Alarm jest wyzwalany na nadajniku i migająca zielona lampka przy symbolu wahadła przestaje migać.



Alarm jest wyzwalany na odbiorniku.

Wibracje na odbiorniku (funkcja niedostępna w niektórych krajach).

Wyświetlacz odbiornika zaświeca się i pojawia się na nim symbol nadajnika.

Obsługa monitora Angelcare®


KROK 1 INSTALACJA PŁYTKI SENSORYCZNEJ POD MATERACEM

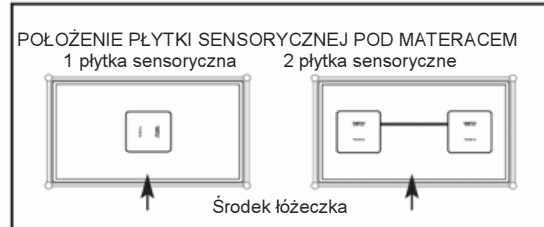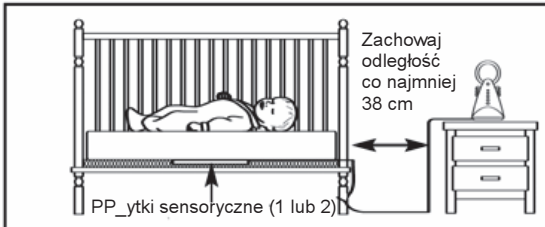

Umieszczenie płytek sensorycznych pokazano powyżej. Upewnij się że płytka skierowana jest nadrukiem ku górze. Nie umieszczaj pościeli między materacem a płytką sensoryczną.

Zabezpiecz przewód płytki sensorycznej przymocowując go do łóżeczka. Poprowadź przewód po podłodze, upewnij się że jest on poza zasięgiem dziecka. Płytki sensoryczna musi spoczywać na całkowicie płaskim i sztywnym podłożu. Podłóż kawałek 6 mm (1/4") płyty tak, aby przykryć całe dno łóżeczka. Upewnij się że przewód płytki sensorycznej przechodzi pod materacem jak pokazano powyżej.

KROK 2 INSTALACJA URZĄDZENIA DO POKOJU DZIECIĘCEGO (NADAJNIK)

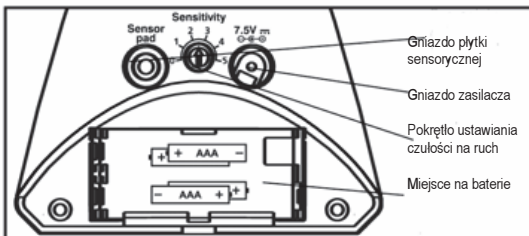


- Połącz długi kabel płytki sensorycznej z nadajnikiem.
- Włóż 4 baterie typu AAA (nie dołączone do zestawu) do nadajnika (baterie będą używane w przypadku awarii zasilania).
- Połącz zasilacz AC z nadajnikiem i włącz zasilacz do gniazda elektrycznego w pokoju dziecka.
- Po podłączeniu nadajnika i odbiornika możesz wyregulować czułość płytki sensorycznej (jeśli jest to wymagane).

KROK 3 INSTALACJA ODBIORNIKA




- Włóż 4 akumulatorki NiMH typu AAA (na wyposażeniu) do odbiornika. NIGDY nie używaj baterii alkalicznych.
- Podłącz zasilacz AC do ładowarki odbiornika i włóż wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego. Przed pierwszym użyciem akumulatorki należy ładować bez przerwy przez 15 godzin.


KROK 4 JAK UŻYWAĆ MONITORA ANGELCARE®

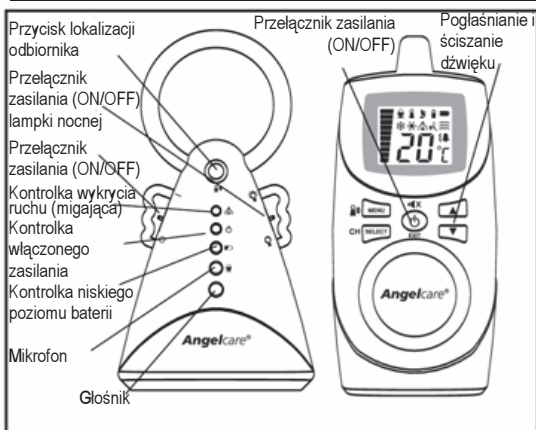

- Gdy akumulatorki są naładowane (po 15 godzinach) włącz nadajnik i odbiornik. Jeśli odbiornik jest włączony a nadajnik jest wyłączony, odbiornik zacznie pikać po 1 minucie. Po 4 sekundach odbiornik się wyłączy.
- Można zaprogramować różne opcje, ale urządzenie jest gotowe do użycia od razu z następującymi ustawieniami fabrycznymi:
 - Dźwięk, ruch i "tik" WŁĄCZONE
 - Kontrola zasięgu WYŁĄCZONA
 - Aktywacja dźwiękiem WYŁĄCZONA
 - Wyświetlanie temperatury WŁĄCZONE, Kontrola temperatury w pokoju dziecka WYŁĄCZONA
 - Alarm na odbiorniku WŁĄCZONY, wibracje WYŁĄCZONE
 - Głośność na poziomie 3
 - Czułość mikrofonu na poziomie 2
- W celu uniknięcia sprzężeń (akustycznych), odległość między nadajnikiem i odbiornikiem powinna wynosić przynajmniej 3 metry.
- Można ustawić poziom głośności na odbiorniku przy pomocy strzałek.
- Aby włączyć lampkę nocną przesunąć prawe skrzydełko ku górze.

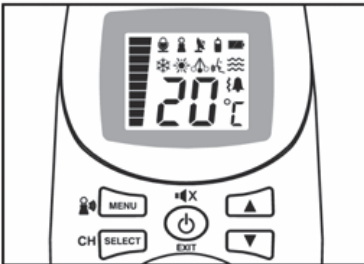KROK 5 WYŚWIETLACZ I PRZYCISKI


- Wszystkie programowalne funkcje monitora Angelcare® są dostępne przez przycisk MENU.
- Kiedy żądana opcja pojawi się na wyświetlaczu, naciśnij SELECT.
- Do wyboru ustawień każdej opcji służą przyciski strzałek GÓRA i DÓŁ.
- **W KAŻDEJ CHWILI po programowaniu funkcji, jeśli chcesz wyjść do menu wyboru, naciśnij przycisk EXIT. Jeśli chcesz wykonać dodatkowe programowanie naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić następną opcję.**

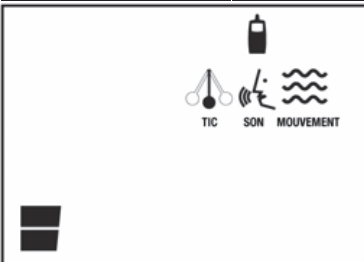KROK 6 TIKI, DŹWIĘKI I RUCHY


- Monitor Angelcare® pozwala Ci wybrać co chcesz monitorować.
- Funkcja „Tik” jest dźwiękiem który sygnalizuje, że płytka sensoryczna wykryła ruch.
 - Funkcja „Dźwięk” jest aktywowana głosem lub transmitowana ciągle.
 - Funkcja „Ruch” jest aktywowana kiedy ruch jest wykrywany przez płytki sensoryczne. Funkcja wykrywa wszystkie ruchy dziecka i ostrzega Cię gdy nie ma ruchu. Sygnał alarmowy włącza się kiedy monitor nie wykryje ruchu przez 20 sekund. Jeśli odbierasz fałszywe alarmy ustaw poziom czułości płytek sensorycznych (KROK 2).
 - Naciśnij MENU, powinny migać 3 symbole.
 - Używając strzałek wybierz każdy z symboli i zdecyduj czy chcesz go WŁĄCZYĆ czy nie.
 - Aby zatwierdzić wybór naciśnij SELECT.
 - Naciśnij MENU aby pokazać następną opcję, lub EXIT jeśli chcesz zakończyć programowanie.

KROK 7 KONTROLKA ZASIĘGU

- Monitor wyposażony jest w opcjonalną funkcję kontroli zasięgu, która powiadamia cię kiedy urządzenia nie mogą komunikować się ze sobą. Brak zasięgu może być spowodowany odległością lub nakładaniem się fal. Zasięg: do 250 metrów (otwarta przestrzeń), 80-100 m (w pomieszczeniu).
- Kiedy urządzenia znajdują się poza zasięgiem co 8 sekund będzie słyszalne PODWÓJNE PIKNIĘCIE i na odbiorniku będzie migał symbol zasięgu.
- Naciskaj przycisk MENU tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się SYMBOL ZASIĘGU i słowo OF.
 - Wybierz On (włącz) lub OF (wyłącz) używając strzałek.
 - Naciśnij SELECT
 - Naciśnij MENU aby pokazać następną opcję, lub EXIT jeśli chcesz zakończyć programowanie.

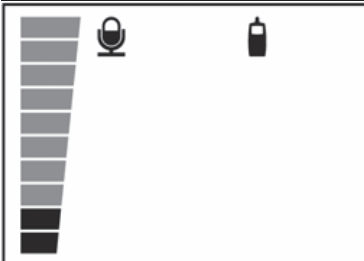KROK 8 CZUŁOŚĆ MIKROFONU

- Monitorowanie dźwięku może być „aktywowane głosem” lub „ciągle”. Jeśli wybierzesz tryb transmisji ciągłej będzie słychać każdy najmniejszy dźwięk twojego dziecka. Jeśli wybierzesz „aktywację głosem” będzie słychać dźwięki w zależności od poziomu czułości jaki wybierzesz.
- Naciskaj przycisk MENU tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się SYMBOL MIKROFONU i słowo On.
 - Użyj strzałek aby wybrać On (aktywacja głosem) lub OF (tryb ciągły)
 - Naciśnij SELECT
 - Jeśli chcesz używać funkcji aktywacji dźwiękiem naciśnij MENU jeszcze raz aby wybrać poziom czułości (4 poziomy) mikrofonu używając strzałek.
 - Naciśnij SELECT jeśli żądany poziom pojawi się na ekranie.
 - Naciśnij MENU aby pokazać następną opcję, lub EXIT jeśli chcesz zakończyć programowanie.

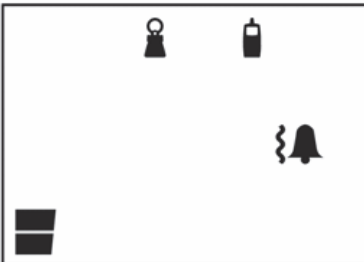KROK 9**ALARMY I WIBRACJE (SYGNALIZACJA WIBRACJAMI NIEDOSTĘPNA W NIEKTÓRYCH KRAJACH)**

To menu pojawia się TYLKO wtedy, gdy w urządzeniu dostępna jest funkcja sygnalizacji wibracjami. Menu pozwala wybrać między następującymi opcjami powiadomień:

- tylko alarm - tylko wibracje - alarm i wibracje

UWAGA: Tryb sygnalizacji wibracjami nie działa kiedy poziom baterii jest niski lub odbiornik znajduje się na ładowarce.


- Naciskaj przycisk MENU tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się SYMBOL DZWONKA (tryb alarmu) i/lub FALI (tryb wibracji) i wybierz żadaną opcję.
- Wybierz żadaną opcję, używając strzałek. Naciśnij SELECT.
- Naciśnij MENU aby pokazać następną opcję, lub EXIT jeśli chcesz zakończyć programowanie.

KROK 10**KONTROLA TEMPERATURY W POKOJU DZIECIĘCYM**

Monitor Angelcare® może także monitorować temperaturę w pokoju dziecka i sygnalizować jeśli temperatura jest za wysoka lub zbyt niska. Potrójne piknięcie będzie słyszalne jeśli temperatura przekroczy wybrany poziom.

• Naciskaj przycisk MENU tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się SYMBOL ŚNIEŻKI I SŁONECZKA ze słowem OF

- Włącz (On) lub wyłącz (OF) funkcję używając strzałek. • Naciśnij SELECT.
- Jeśli wybrałeś On przy funkcji kontroli temperatury, naciśnij MENU. Powinien pojawić się symbol śnieżki wraz z temperaturą. Wybierz żadaną najniższą temperaturę przy pomocy strzałek i naciśnij SELECT.
- Naciśnij MENU. Powinno pojawić się symbol słoneczka wraz z temperaturą. Wybierz żadaną najwyższą temperaturę przy pomocy strzałek i naciśnij SELECT.
- Naciśnij EXIT jeśli to była ostatnia dostępna funkcja programowania.

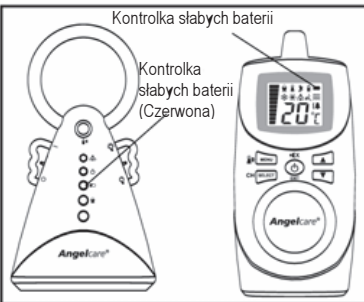KROK 11**TRYB PRACY Z BATERII I OSTRZEŻENIA**

• Monitor będzie korzystał z baterii w przypadku awarii zasilania, jednak tylko wtedy gdy baterie zostały zainstalowane **zarówno w nadajniku jak i odbiorniku**.


• Możliwe jest używanie monitora Angelcare® w miejscach gdzie nie ma dostępu do zasilania sieciowego.

• Kiedy na nadajniku miga CZERWONA kontrolka słabych baterii oznacza to, że baterie powinny być wymienione. Na wyświetlaczu odbiornika miga symbol pustej baterii i pojawi się symbol nadajnika. Słychać także co 15 sekund krótki sygnał dźwiękowy przez ok 30 minut, aż urządzenie wyłączy się.

• Odbiornik powinien być ładowany wtedy gdy symbol baterii jest pusty (nie miga) i słychać sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy będzie słychać co 15 sekund do momentu aż urządzenie wyłączy się.

Uwaga: Nie używaj baterii alkalicznych w odbiorniku.

WAŻNE: Jeśli włączona jest funkcja kontroli zasięgu i nadajnik wyłączy się, będzie słychać z odbiornika sygnał utraty zasięgu i na odbiorniku zostanie wyświetlony symbol kontroli zasięgu.

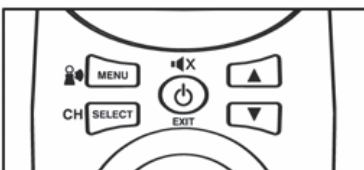KROK 12**DODATKOWE FUNKCJE**

• **WYBÓR KANAŁU:** Jeśli odbiór nie jest czysty, lub jeśli słyszysz pogłos powinieneś zmienić kanał. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT aby zmienić kanał (strzałkami). Następnie naciśnij przycisk SELECT jeszcze raz aby potwierdzić wybór.

• **CHWILOWE WYCISZENIE:** Jeśli chcesz wyciszyć dźwięk na 2 minuty, naciśnij przycisk EXIT. Aby wznowić transmisję dźwięku przed upływem 2 minut naciśnij EXIT jeszcze raz. Możesz także wyłączyć alarm przez naciśnięcie tego przycisku (z wyjątkiem alarmu o niskim poziomie baterii)

• **POŁĄCZENIE ODBIORNIKA Z NADAJNIKIEM:** Jeśli utracisz połączenie między urządzeniami, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU na odbiorniku, symbol „zasięgu” będzie migał. Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk na nadajniku aby przywrócić połączenie do nadajnika. Kontrolka "Tik" będzie migała.

WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz zlokalizować odbiornik, naciśnij górny przycisk na nadajniku.

Testowanie monitora Angelcare®

UWAGA: Sprawdź swój Monitor Angelcare® PRZED pierwszym użyciem, a potem rób to regularnie, aby mieć pewność, że funkcjonuje prawidłowo.

Monitor Angelcare® może być używany poza łóżeczkiem w różnych miejscach do spania. Sprawdź monitor kiedy przenosisz płytkę sensoryczną na nowe miejsce, aby upewnić się czy czułość jest właściwie ustawiona dla nowego podłoża czy materaca. Zobacz do rozdziału „Obsługa monitora Angelcare®” (krok 6).

1. Przełącz odbiornik na funkcję „Tylko dźwięk”. Poproś kogoś aby mówił do nadajnika lub umieść przy nim radio. Powinieneś słyszeć te dźwięki z odbiornika. Jeżeli ich nie słychać zobacz do rozdziału „Rozwiązywanie problemów”.

2. Sprawdź czy monitor wykrywa ruch. W odbiorniku włącz funkcję „Tylko ruch”. Delikatnie połóż rękę na materacu. Górna zielona kontrolka (przy symbolu wahadła) będzie świecić przy każdym twoim ruchu. Następnie zdejmij rękę z materaca. Ponieważ monitor wykryje brak ruchu usłyszysz po 15 sekundach poprzedzający alarm „Tik” a 5 sekund później włączy się alarm dźwiękowy a zielona kontrolka na nadajniku wyłączy się.

UWAGA: Przyczyną nie włączenia się alarmu może być fakt, że płytka sensoryczna wykrywa wibracje z podłogi, jest duży przeciąg lub łóżeczko jest przez kogoś dotykane. Unikaj kontaktu z łóżeczkiem gdy monitor jest włączony. Umieść łóżeczko przy ścianie, z dala od przeciągów. Czułość płytki sensorycznej może być zmniejszona. Zajrzyj do rozdziału „Obsługa monitora Angelcare®” (Krok 6).

3. Aby zatrzymać alarm połóż rękę delikatnie na materacu, wtedy płytka sensoryczna ponownie wykryje ruch. Zielona kontrolka przy symbolu wahadła ponownie zacznie migać, gdy płytka sensoryczna wykryje ruch. Możesz także wyłączyć i ponownie włączyć nadajnik aby przerwać alarm.

4. Sprawdź czy praca nadajnika i odbiornika jest prawidłowa przy zasilaniu bateriami bez zasilacza AC. Jeżeli zielona kontrolka na nadajniku nie włącza się, baterie powinny być wymienione. Jeżeli odbiornik nie działa i na wyświetlaczu nic się nie pojawia, naładuj akumulatorki.

Ostrzeżenia

Ten produkt NIE jest urządzeniem medycznym ani urządzeniem do zapobiegania przypadkom Zespołu Nagłej Śmierci Niemowląt (SIDS)

- Ten produkt NIE służy do zastąpienia bezpośredniego nadzoru nad dzieckiem. Sprawdzaj aktywność dziecka w regularnych odstępach czasu. Monitorowanie dzieci przedwcześnie urodzonych, lub uznanych za należące do grupy ryzyka, powinno być przeprowadzane tylko pod nadzorem lekarza lub innej odpowiednio wykwalifikowanej osoby.

- NIE umieszczaj odbiornika blisko urządzeń bezprzewodowych i kuchenek mikrofalowych. Może to powodować zakłócenia komunikacji. Ich obecność może powodować zakłócenia przesyłania sygnału alarmowego.

- Płytkę sensoryczną może wykrywać ruch z wielu źródeł zarówno z pokoju dziecka jak i z poza niego na przykład: wentylatorów, pralek, głośnej muzyki. Przed użyciem Monitora Angelcare® Upewnij się że wszystkie źródła wibracji zostały wyeliminowane. Unikaj kontaktu z łóżeczkiem, kiedy monitor jest w użyciu. Zobacz do rozdziałów „Obsługa monitora Angelcare®” (Krok 6) i „Rozwiązywanie problemów”

- ZAWSZE kładź monitor na płaskim podłożu w pozycji pionowej, poza zasięgiem dziecka.

- Ułóż wszystkie kable poza zasięgiem dziecka aby wyeliminować możliwość obrażeń na skutek zaplątania kabli.

- NIE dotykaj końca przewodu zasilacza, kiedy jest on podłączony do gniazda elektrycznego.

- Monitor Angelcare® pracuje w ogólnodostępnym zakresie transmisji sygnałów. Odbiornik może odbierać sygnały lub sprzęgać się z innymi monitorami na obszarze jego zasięgu.

Twój monitor może być również wykrywany przez inne urządzenia domowe. Dla ochrony swojej prywatności upewnij się, że nadajnik i odbiornik są wyłączone, gdy nie są używane.

- Kiedy stosowany jest monitor, NIE używaj ruchomych łóżeczek lub innych akcesoriów do łóżeczka, które wytwarzają wibracje. Alarm się nie włączy, ponieważ monitor będzie stale wykrywał ruch.

- Monitor Angelcare® jest całkowicie bezpieczny. Płytkę sensoryczną i jej przewody są zupełnie nieaktywne. Nie przewodzą prądu elektrycznego i nie emitują żadnej formy energii. Nadajnik emituje tylko bardzo małej mocy sygnały radiowe poprzez antenę. Te sygnały nie stwarzają niebezpieczeństwa.

- Monitor może być używany w każdym łóżeczku lub innym bezpiecznym miejscu, (nie przenoszącym ruchu i wibracji) przeznaczonym do spania dla dziecka.

- Monitorowanie bliźniaków:

Potrzebne są dwa monitory ruchu i dźwięku AC401. Upewnij się że każde z urządzeń ustawione jest na innym kanale. Potrzebne są także dwa odbiorniki (po jednym dla każdego łóżeczka).

Nie używaj monitora Angelcare® do monitorowania ruchu dwójki dzieci w jednym łóżeczku.

- Ten produkt powinien być naprawiany wyłącznie przez autoryzowany serwis. Wewnątrz monitora nie ma części przewidzianych do samodzielnej naprawy lub regulacji przez użytkownika. Wszystkie pytania dotyczące serwisu kieruj do swojego dystrybutora.

Zalecenia

PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI: Zachowaj instrukcję obsługi na wypadek, gdybyś zaszła potrzeba skorzystania z niej w przyszłości.

USZKODZENIA OD WODY, ZAWILGOCENIA I GORĄCA: Trzymaj wszystkie części urządzenia z dala od wody (zlew, wanna, basen kąpielowy) i miejsc, które emitują ciepło (piec, grzejnik).

WENTYLACJA: ZAWSZE kładź monitor na płaskim podłożu w pozycji pionowej, tak by wokół niego mogło swobodnie przepływać powietrze. Płytkę sensoryczną wykonaną jest z tworzywa i nie pozwala na przepływ powietrza. Z tego powodu w skrajnych przypadkach między materacem a płytką sensoryczną może tworzyć się pleśń. Sugerujemy systematyczne (prewencyjne) odwracanie materaca.

ŹRÓDŁO ZASILANIA AC: Używaj TYLKO zasilaczy AC dołączonych do Monitora Angelcare®.

OCHRONA PRZEWODU: Chroń przewody przed uszkodzeniem. Kable są wystarczająco długie, aby mogły być poprowadzone w taki sposób, który pozwoli uniknąć nadeptnięcia lub przygniecenia ich przez inne przedmioty.

CZYSZCZENIE: Przed czyszczeniem odłącz monitor. NIE zanurzaj go w wodzie. Do wycierania go z kurzu używaj suchej szmatki. NIE używaj środków czyszczących lub rozpuszczalników. Elementy monitora wycieraj lekko wilgotną szmatką ze środkiem antyseptycznym lub delikatnym detergentem.

USZKODZENIA PRZEZ PRZEDMIOTY I PŁYNY: Należy uważać, żeby na monitor nie upadły jakieś przedmioty i aby żadne płyny nie dostały się do wnętrza elementów monitora.

PRZERWY W UŻYWIANIU: Jeśli nie używasz monitora przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie i odłącz zasilacz od gniazda elektrycznego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązanie
Fałszywe alarmy	<ul style="list-style-type: none"> • Dziecko zostało wyjęte z łóżeczka, a nadajnik nie został wyłączony. • Przewód płytki sensorycznej nie jest włączony prawidłowo do nadajnika. • Płytki sensoryczna nie ma pełnego kontaktu z materacem lub materac nie leży na całkowicie płaskim i twardym podłożu. • Dziecko bardzo głęboko śpi lub przesunęło się z płytki sensorycznej na brzeg łóżeczka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz nadajnik.. • Sprawdź połączenie pomiędzy płytką sensoryczną i nadajnikiem. Odłącz a następnie ponownie podłącz kabel. • Upewnij się, że pomiędzy materacem a płytką sensoryczną nie ma przeszcieradła. Płytki sensoryczna musi leżeć na całkowicie płaskim i twardym podłożu. Połóż płytę grubości 6 mm (1/4") tak aby pokryła całe dno łóżeczka. • Upewnij się, że płytki sensoryczna jest umieszczona tak jak to zostało opisane w rozdziale „Obsługa monitora Angelcare®”. Może zająć potrzeba regulacji czułości wtedy zobacz do rozdziału „Regulacja czułości urządzenia”
Alarm się nie włączył	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik wykrywa ruch bo łóżeczko jest dotykane. • Nadajnik wykrywa ruchy spoza łóżeczka takie jak urządzenia mechaniczne, silne przeciągi itp. • Ustawiona jest za wysoka czułość. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unikaj kontaktu z łóżeczkiem, kiedy monitor jest włączony. • Postaw łóżeczko blisko ściany, żeby zapobiec wykrywaniu przez płytkę sensoryczną ruchu z poza łóżeczka. • Może zaistnieć potrzeba zmniejszenia czułości, zajrzyj do rozdziału „Testowanie monitora Angelcare®” oraz „Obsługa monitora Angelcare®”.
Nie są emitowane żadne dźwięki	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik i odbiornik znajdują się zbyt daleko od siebie i kontrolka pozostawania w zasięgu jest wyłączona na odbiorniku. • Baterie są rozładowane lub niewłaściwie zainstalowane. • Zasilacze AC nie są podłączone właściwie lub gniazdo elektryczne jest uszkodzone. • Nadajnik lub odbiornik nie są włączone. 	<ul style="list-style-type: none"> • Przenieś odbiornik bliżej nadajnika. • Sprawdź / wymień baterie lub naładuj akumulatorki w odbiorniku. • Sprawdź połączenia lub zmień gniazdo elektryczne. • Upewnij się, że nadajnik i odbiornik są włączone.
Nie świeci się kontrolka włączonego zasilania (druga zielona kontrolka) na nadajniku	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilacze AC nie są podłączone właściwie lub gniazdo elektryczne jest uszkodzone. • Nadajnik nie jest włączony. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź połączenia lub zmień gniazdo elektryczne. • Przesuń lewe skrzydełko w pozycję ON.
Odbiornik jest włączony ale wyświetlacz cyfrowy pokazuje „--” i miga symbol nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik nie jest włączony. 	<ul style="list-style-type: none"> • Włącz nadajnik.
Bardzo słaby odbiór	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik i odbiornik znajdują się zbyt daleko od siebie i kontrolka pozostawania w zasięgu jest wyłączona. • Nadajnik lub odbiornik znajduj_ si_ blisko du_ ej metalowej masy. • Nadajnik lub odbiornik nie zostały ustawione w pozycji pionowej. • Komunikacja między odbiornikiem, a nadajnikiem jest przerwana. • Baterie są za słabe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Włącz kontrolę zasięgu jak pokazano w KROKU 7 w rozdziale „Obsługa monitora Angelcare®”. • Przenieś odbiornik bliżej nadajnika. • Zmień położenie nadajnika lub odbiornika. • Umieść nadajnik i odbiornik na płaskiej powierzchni poza zasięgiem dziecka. • Upewnij się że podłączyłeś zasilacz do gniazda sieciowego położonego najbliżej urządzenia i o łatwym dostępie. • Połącz odbiornik z nadajnikiem jak pokazano w KROKU 12 rozdziału „Obsługa monitora Angelcare®”. • Wymień baterie lub naładuj akumulatorki w odbiorniku.
Zakłócenia, sprzężenia (sprzężenia z innymi monitorami, telefonami bezprzewodowymi, radiotelefonami przenośnymi, itp.)	<ul style="list-style-type: none"> • Wybrany kanał nie jest wolny od zakłóceń. • Odbiornik jest położony blisko urządzeń mechanicznych, lamp fluorescencyjnych, telewizora, itp.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wybierz inny kanał jak pokazano w KROKU 12 rozdziału „Obsługa monitora Angelcare®”. • Obróć odbiornik lub odsuń go od źródła zakłóceń.
Sprzężenia (głośne dźwięki emitowane z odbiornika)	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajniki i odbiornik są zbyt blisko siebie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Umieść nadajnik i odbiornik dalej od siebie (przynajmniej w odległości 3 metrów). • Zmniejsz poziom głośności na odbiorniku.

GWARANCJA

Angelcare® gwarantuje pierwszemu nabywcy tego produktu, że monitor ruchu i dźwięku Angelcare® (Model AC401) nie posiada wad materiałowych ani produkcyjnych. Jeśli wymieniony powyżej system monitorujący nie działa prawidłowo, pomimo że jest używany w normalnych warunkach i zgodnie z zaleceniami, to w okresie gwarancyjnym jednego (1) roku, Angelcare® naprawi lub wymieni nieodpłatnie ten produkt według własnego wyboru. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.

Produktowi musi towarzyszyć dowód zakupu: paragon, faktura albo inne potwierdzenie, że ten system monitorujący podlega gwarancji. Angelcare® poniesie koszty naprawy lub wymiany produktu i dostarczenia go z powrotem do Klienta.

Ta gwarancja nie ma zastosowania do produktu, który został uszkodzony w wyniku niewłaściwego przechowywania, wypadków, złego zasilania lub użytkowania niezgodnie z zaleceniami. Gwarancja jest także nieważna w razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez osoby nieuprawnione. Angelcare® nie jest odpowiedzialny za przypadkowe lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania uszkodzenia w odniesieniu do tego produktu. Gwarancja wyklucza także każdą inną odpowiedzialność poza tym, co zostało przedstawione powyżej. Nie udziela się żadnych innych gwarancji.

PRZEPISY PRAWNE ZMIENIAJĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKŁYCH USZKODZEŃ, TAK ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ SIĘ DO CIEBIE NIE ODNOSIĆ.

NIE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK REZULTATY UŻYWANIA MONITORA.

WAŻNE ! Monitor Angelcare® jest produktem osobistego użytku. Prosimy nie zwracać go do sklepu. Jeśli masz pytania albo potrzebujesz pomocy, przed zwróceniem produktu zadzwoń do swojego dystrybutora.

To urządzenie spełnia wymogi określone w FCC (Federal Communications Commission Rules) part 15. Działanie jego jest określone przez następujące warunki. (1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych interferencji i (2) urządzenie musi przyjmować wszystkie interferencje, które otrzyma, również te, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie były zaakceptowane przez instytucję odpowiedzialną za zgodność z przepisami może pozbawić użytkownika prawa do używania urządzenia.

UWAGA: W wyniku testów urządzenia stwierdzono, że spełnia ono wymagania dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z FCC. Wymagania te zostały stworzone aby zapewnić zabezpieczenie przed szkodliwymi interferencjami powstającymi w instalacji domowej. To urządzenie generuje i może przesyłać sygnał o częstotliwości radiowej. Jeśli nie jest zainstalowane lub używane zgodnie z instrukcją może spowodować szkodliwe interferencje radiowe. Nie ma gwarancji, że interferencje nie pojawią się w konkretnej instalacji domowej. Jeżeli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co może być stwierdzone przez włączenie lub wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować te zakłócenia w jeden z następujących sposobów:

- Zmień ustawienie lub położenie odbierającej anteny.
- Zwiększ dystans pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem
- Włącz urządzenie do innego obwodu elektrycznego niż włączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się z dealerem lub doświadczonym technikiem RTV.

UWAGA:

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu baterii przy zastosowaniu nieprawidłowych baterii. Baterie dołączone do zestawu to 4 akumulatory AAA wyprodukowane przez Sanik Battery Co. Ltd. SN-AAA60HJ 1.2V 600mAh i mogą one być zastąpione TYLKO przez 4 akumulatory AAA o podobnych parametrach.

Transmisja:

927 Mhz (USA i Kanada)

864 Mhz (Europa, Azja, Afryka, Oceania). Transmisja danych między nadajnikiem a odbiornikiem realizowana jest na częstotliwości 2.4 Ghz.



Chroń środowisko!

To urządzenie elektryczne wykonane jest z materiałów które mogą być wykorzystane do ponownego użycia i nie można go umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami. Zużyty sprzęt proszę oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (o szczegóły pytaj lokalne władze).